



Как пользоваться Пси-Про (ТОЛЬКО для ОС Андроид):

1. Установите магазин приложений RuStore с их официального сайта или по ссылке <https://www.rustore.ru/download>
2. Запустите приложение RuStore и найдите в нём приложение Пси-Про (нажав на иконку лупы).
- * Предоставьте права приложению RuStore на установку приложений на Ваш телефон. Операционная система сама спросит Вас об этом при попытке установки Пси-Про.
3. Скачайте и установите приложение Пси-Про.
4. Запустите приложение Пси-Про и нажмите «Регистрация» для создания своей учётной записи и личного кабинета.
5. Заполните все поля и нажмите кнопку «Регистрация». Обязательно запишите на бумаге своё имя пользователя и пароль!
6. После создания учётной записи Вы вернётесь на начальный экран. Введите созданные имя пользователя и пароль.
7. Создайте новую карточку клиента (нажмите на плюс в нижнем правом углу).
8. Запустите измерение - нажмите плюс в правом нижнем углу на экране со списком экспериментов.
9. Перед началом прохождения тестирования убедитесь, что на Вашем телефоне **отключено управление жестами**. Зайдите в «Настройки» телефона, найдите пункт меню «Навигация в системе». Выберите вариант «**Кнопки**».
10. Следуйте текстовым и аудио инструкциям для завершения измерения.
11. По окончании измерения выберите (отметив галочками) разделы отчёта, которые Вас интересуют, либо выберите "Весь отчёт целиком" и нажмите на кнопку "Оплатить".
11. Произведите оплату согласно инструкциям на экране.
12. Сразу после оплаты выбранные разделы отчёта станут доступны в приложении для чтения и сохранения, и/или отправки на электронную почту.

